



炬輝公司罩得住醫療口罩產品說明

炬輝公司罩得住醫療口罩產品優點說明：



- ▶ 隱藏式壓鼻樑線設計，外觀造型俐落大方，內摺設計，一體成形，圖案完整，沒有白色邊條，視覺上美觀漂亮，圖案素雅，簡單大方，產品有Made In Taiwan與 MD 鋼印，無塵室環境生產，產品符合國家CNS 14774一般醫用口罩之性能規格要求，品質更有保障。
- ▶ 雙鋼印醫療用口罩，耳帶與口罩之焊接強度達一公斤以上，強度遠超過衛服部要求0.3公斤強度之三倍以上，品質保證，值得使用者之安心使用。
- ▶ 精心設計罩得住口罩與臉頰兩側無間隙，口罩穿戴貼附非常良好，口罩防護性佳，無邊緣縫隙滲透感染之風險疑慮與恐慌，品質值得您的信賴與安心採用。
- ▶ 口罩材料之無毒檢測、皮膚刺激、細胞毒與皮膚敏感性之檢測合格，消費者安心使用。
- ▶ 炬輝公司使用隱藏性鼻樑線設計結構，讓鼻樑線不易突出與外露之風險，鼻樑線變形量最小，定型最好，不易變形，貼附性佳，使用者安全更有保障。
- ▶ 使用親膚層為超柔細複合纖維不織布 (ES Bicomponent Fiber)，其特性為布面光滑柔細不易起毛絲，並可吸附臉部的油脂汗水及呼吸說話時產生的水氣，質感柔細光滑，不容易起毛與過敏，口罩內部乾爽透氣，提供長時間配戴者之優質舒適感。
- ▶ 核心技術團隊來自工研院技術團隊，品質與技術水準，核心技術優於一般業界之上，品質技術力更有保障。



產品規格包裝標示



1.尺寸：

1-1.成人口罩(17.5x9.5cm):適用於國中以上或是成人者;

1-2.兒童口罩(14.5X9.0cm):適用於幼稚園大班至小學六年級之兒童或是臉型狹長之成人

2.規格：50盒/箱;50片/盒(皆為10片小包裝X5組--隨身好攜帶)或是 單片包裝

3.製造日期：詳外盒(批號同製造日期)

4.有效期限：五年

5.商品原產地：台灣

6.材質：非織物不織布、MB熔噴不織布、PP+EP複合纖維。

7.適用：

□ 適合一般民眾居家外出使用。

□ 防止病人與醫護人員間的體液、微生物及粒狀物質之傳遞與感染。

□ 防塵濾菌(金黃色葡萄球菌)，醫療院所、學校機關、工廠作業騎車與一般灰塵、家庭清潔等場合均適用。

8.交期:現貨庫存下單5日內出貨完成,無現貨者或是銷售完畢者,建議改選他款現貨或是再確認生產交期

9.訂單:店家保留訂單接受與否權利,若因交易條件有誤或有其他情形導致無法接受訂單,將另行通知給客戶。

10.生產日期、顏色編號,貼附於紙盒之底部,請依照紙盒底部標示之顏色編號分類,依照訂單上產品名稱前方之顏色編號相符即可,以利快速產品辨識與方便取貨。(如連結附件說明)

如:2021.0930(生產日期) --- 127(顏色編號)

醫療口罩之證照與聯繫方式:

- ▶ 產品名稱：炬輝罩得住醫療用口罩
- ▶ 醫療器材許可証字號：衛部醫器製壹字第009107號
- ▶ 公司工廠登記證:炬輝公司工廠登記編號 68003727
醫療器材販賣業藥商許可執照:炬輝公司許可執照---桃市藥販 字第623202P773號
- ▶ 醫療器材製造業藥商許可執照:炬輝公司工廠許可執照---桃市藥製 字第6132041426號
- ▶ 藥商許可執照：桃市藥販字 第 623202P773 號
藥商名稱：炬輝股份有限公司
藥商地址：桃園市中壢區莊敬路838巷38號
諮詢電話：03-4780018,0937124229

E-mail：mask@foxlux.com

- ▶ LINE 官方帳號:@foxlux



炬輝公司罩得住醫療口罩之檢測報告

黃崇松 (03-4639367)

TTRI 財團法人紡織產業綜合研究所
Taiwan Textile Research Institute

試驗報告 土城場區
TEST REPORT TUCHENG

發行日期: 2020.12.07 收件/試驗起始日期: 2020.11.20
Date of Issue: 2020.12.07 Date of Receipt and Test Start: 2020.11.20

報告編號: TFF9K489 數量: 1件 報告頁次/頁數: (P1/3) 委文字號: 空 白
Report No.: TFF9K489 Quantity: 1 Page Order/Pages: (P1/3) Ref. No.:

報告抬頭: 炬輝股份有限公司(U3454) 試件類別: 口罩
Report Title: 炬輝股份有限公司(U3454) Item:

地址: 320 桃園市中壢區莊敬路838巷38號
Address: 320 Taoyuan City Zhongli District Zhuangjing Road 838 Alley 38

試驗項目	試驗結果	試驗方法
*空氣交換壓差 ($\text{mmH}_2\text{O}/\text{cm}^2$)	4.4	CNS 14774 T5017-2018 9.4
	4.3	CNS 14777 T4039-2003
	4.1	
	3.5	
	4.0	

註: 空氣交換壓差, 取5個樣品測試。
註: 依委託者所提供來樣資料為: 炬輝公司罩得住醫療用口罩 (未滅菌)

註: 試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果, 不對產品合法性做判斷。
註: 檢驗項目有標"*"者, 指該檢驗項目經衛生福利部認證, 且依認證之檢驗方法執行檢驗。

Department of Testing and Certification
檢測及驗證部

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人:
Authorized by president of
Taiwan Textile Research Institute

檢測及驗證部 吉瑞宏
主任 任高瑞宏

紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax: +886-2-22675108, +886-2-22689839

附記: 1. 本報告僅對樣品負責, 樣品保留期限為一個月。
Note: This report is only responsible for the submitted sample(s), which will be kept for one month period.
2. 本報告非經本檢測及驗證部書面同意, 不得轉錄複製, 但全部複製除外。
This report cannot be reproduced in any way, except in full context, without the prior agreement in writing of this Department of Testing and Certification.
3. 試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。
The test report should not be used for public advertisement and commercial promotion.

黃崇松 (03-4639367)

TTRI 財團法人紡織產業綜合研究所
Taiwan Textile Research Institute

試驗報告 土城場區
TEST REPORT TUCHENG

發行日期: 2020.12.07 收件/試驗起始日期: 2020.11.20
Date of Issue: 2020.12.07 Date of Receipt and Test Start: 2020.11.20

報告編號: TFF9K489 數量: 1件 報告頁次/頁數: (P2/3) 委文字號: 空 白
Report No.: TFF9K489 Quantity: 1 Page Order/Pages: (P2/3) Ref. No.:

報告抬頭: 炬輝股份有限公司(U3454) 試件類別: 口罩
Report Title: 炬輝股份有限公司(U3454) Item:

地址: 320 桃園市中壢區莊敬路838巷38號
Address: 320 Taoyuan City Zhongli District Zhuangjing Road 838 Alley 38

試驗項目	試驗結果	試驗方法
*細菌過濾效率(%)	99.0	CNS 14774-T5017-2018 9.2
金黄色葡萄球菌	98.8	CNS 14775 T4037-2003
A7CC 6538	99.0	
	99.0	
	99.0	

註: 對照菌的平均菌落數: 2389 CFU。
註: 平均粒径: 3.1 μm 。
註: 測試菌: 外質。
註: 測試流量為 39.5 cm^3 。
註: 測試流量: 28.3 L/min 。
註: 依委託者所提供來樣資料為: 炬輝公司罩得住醫療用口罩 (未滅菌)

註: 試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果, 不對產品合法性做判斷。
註: 檢驗項目有標"*"者, 指該檢驗項目經衛生福利部認證, 且依認證之檢驗方法執行檢驗。

Department of Testing and Certification
檢測及驗證部

產品符合國家CNS 14774一般醫用口罩之性能規格要求:

標準規格:細菌過濾效率(%)大於或等於95%

---> 實際測試數值:細菌過濾效率(%)98.8~99%

標準規格:壓差小於或等於5

---> 實際測試數值: 壓差 3.5~4.4

炬輝罩得住口罩耳帶焊接強度測試

- ▶ 炬輝公司罩得住雙鋼印醫療用口罩,耳帶與口罩之焊接強度達一公斤以上,強度遠超過衛服部要求0.3公斤強度之三倍以上,品質保證,值得使用者之安心使用。




炬輝公司罩得住雙鋼印醫療用口罩貼附性防護力測試報告

- ▶ 口罩側邊有縫隙，就容易會被感染,口罩貼附性對於口罩防護性有關鍵性之影響,故炬輝公司罩得住雙鋼印醫療用口罩，精心設計口罩與臉頰兩側無間隙,口罩穿戴貼附非常良好，口罩防護性佳，無邊緣縫隙滲透感染之風險疑慮與恐慌，品質值得您的信賴與安心採用，大家共同一起防疫，保護您的健康喔。

口罩側邊有縫隙，就會被感染！專訪英國變種病毒權威：台灣神話為何破滅？

https://www.cw.com.tw/article/5114923?from=amp&utm_campaign=line_-_website_share-icon&utm_medium=website_share&utm_source=line_

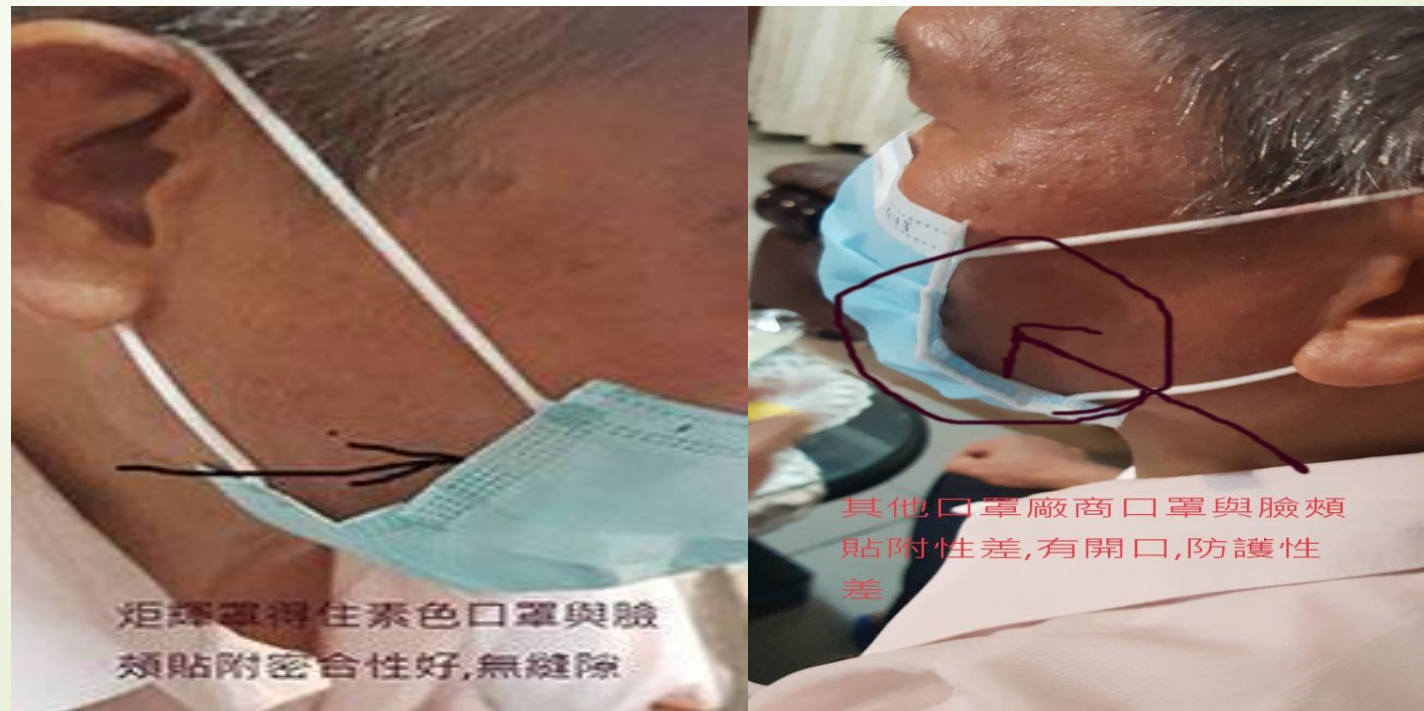

炬輝公司口罩材料之無毒檢測報告

1. 口罩外層布料無毒檢測(不含「偶氮色料」)之檢驗報告
CNS 16113 -1(108年10月24日): 纖維經萃取與不經萃取偵測使用之特定偶氮色料,經檢測得知品質OK,未檢出22種特定偶氮色料成分

口罩外層布料無毒檢測(不含「偶氮色料」)之檢驗報告-1

口罩外層布料無毒檢測(不含「偶氮色料」)之檢驗報告-2

2. 耳帶無毒檢測之檢驗報告

2-1. 不含「偶氮色料」檢驗報告
不含「偶氮色料」檢驗報告

2-2. 皮膚刺激報告 Ear loop
皮膚刺激報告 Ear loop--測試合格

2-3. 細胞毒報告 Ear loop
細胞毒報告 Ear loop --測試合格

3. 不織布之檢測報告

3-1. FDA 塑粒檢測報告---合格

3-2. TSN20-005260-化學檢驗報告---合格

3-3. TSN20-005263-化學檢驗報告---合格

3-4. TSN20-SGS-歐盟209項檢測報告---合格

3-5. Eastlon Polyolefin Fiber (mask application)測皮膚敏感性報告--合格

依據 CNS 16113 -1(108年10月24日)紡織品-偶氮色料衍生特定芳胺的測定法,以氣相層析質譜儀(GC-MS)分析。

口罩外層布料無毒檢測()之檢驗報告

測試標準: CNS 16113 -1(108年10月24日): 纖維經萃取與不經萃取偵測使用之特定偶氮色料

No. **芳基芳胺化合物** 偶氮色料皆測試合格 結果

No.	芳基芳胺化合物	方法 A (A/B/C)	方法 D (A/B/C)
1.	對-胺基聯苯	92-67-1	N
2.	聯苯胺	92-87-5	N
3.	對-氨基-鄰-甲苯胺	95-69-2	N
4.	2-萘胺	91-59-8	N
5.	鄰-胺基偶氮甲苯	97-56-3	N
6.	5-硝基-鄰-甲苯胺	99-55-8	N
7.	4-氨基苯胺	106-47-8	N
8.	2,4-二氨基苯甲醌	615-05-4	N
9.	4,4'-二胺基二苯甲烷	101-77-9	N
10.	二氨基聯苯胺	91-94-1	N
11.	二甲氨基聯苯胺	119-90-4	N
12.	鄰-二甲基聯苯胺	119-93-7	N
13.	3,3'-二甲基-4,4'-二胺基二苯甲烷	838-88-0	N
14.	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	N
15.	4,4'-亞甲雙(2-氨基苯胺)	101-14-4	N
16.	4,4'-二胺基二苯醌	101-80-4	N
17.	4,4'-硫二苯胺	139-65-1	N
18.	鄰-甲苯胺	95-53-4	N
19.	2,4-甲苯二胺	95-80-7	N
20.	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	N
21.	鄰-甲氨基苯胺	90-04-0	N
22.	4-胺基偶氮苯	60-09-3	N

炬輝罩得住口罩之鼻樑線定型測試

- 不同荷重下, 炬輝罩得住口罩之鼻樑線變形量最小, 定型最好, 不易變形, 貼附性佳
- 炬輝公司隱藏性鼻樑線設計結構, 讓鼻樑線不易突出與外露之風險, 使用者安全更有保障

炬輝罩得住口罩之塑線定型測試示意圖

✓ 新塑線拉力測試

- * 步驟1. 取30cm塑線, 裁取中間平整處10cm為樣品
- * 步驟2. 10cm塑線, 中間對折後在各折2cm成90度, 如圖1
- * 步驟3. 靜置1分鐘後, 塑線呈現微張為初始值(垂吊0g), 如圖2
- * 步驟4. 開始依序垂吊砝碼並在3分鐘後量測數據。如圖3



圖1



圖2



圖3

■ 拉力測試數據(鼻樑線定型差異量比較)

測試日期	2018/6/1	2018/6/1	2018/6/1	2018/6/1	2018/6/1	2018/6/1	2018/6/1	2018/6/1	2019/6/3
g/cm	3.0x0.7mm 3PW塑線	H廠塑線	Q廠塑線	C廠塑線	單軌鋁線	雙軌鐵線	4.0x 0.5mm (無壓紋)	日本 4mm	炬輝使用 之塑線 3.0x0.7mm G2PW
0g	0.5	0.6	1.2	0.8	0.8	0.2	0.5	0.5	0.3
10g	X	X	1.9	1.2	1.4	X	X	X	0.3
15g	X	X	X	X	2.0	X	X	X	0.3
20g	0.6	2.0	2.3	1.3	2.6	0.6	1.4	1.5	0.4
25g	X	X	X	X	3.0	X	X	X	0.4
40g	1.1	2.6	2.6	2.1	X	1.0	2.1	1.7	0.5
60g	1.4	3.0	3.0	2.7	X	1.4	2.5	2.3	0.6
80g	1.6	3.4	3.0	2.9	X	1.8	2.8	2.9	0.7

目前炬輝使用之塑線不同荷重下, 塑性變形量最小, 塑性定型最好, 不易變形, 貼附性佳

口罩材料之皮膚刺激,細胞毒與皮膚敏感性之測試報告

1.耳帶無毒檢測之檢驗報告

1-1.皮膚刺激報告 Ear loop

皮膚刺激報告 Ear loop--測試合格

1-2.細胞毒報告 Ear loop

細胞毒報告 Ear loop --測試合格

2.不織布之檢測報告

2-1.FDA塑粒檢測報告---合格

2-2.TSN20-005260-化學檢驗報告---合格

2-3.TSN20-005263-化學檢驗報告---合格

2-4.-TSN20-SGS-歐盟209項檢測報告---合格

2-5.Eastlon Polyolefin Fiber (mask application)測皮膚敏感性報告--合格



醫療口罩
防疫特價中



快掃描  加入 LINE官方帳號！
不定時享有優惠特價喔！

line官方帳號：@foxlux
<https://www.foxlux.com>

專業工廠直營
客製化口罩製作

罩得住

炬輝公司

醫療用口罩

(未滅菌)



50片裝
台灣製
Made in Taiwan

健康
防護



Medical Mask (Non-sterile)



工廠聯絡電話：03-4780018
客製化口罩專線：0937124229
Email：mask@foxlux.com
廠址：桃園市楊梅區楊湖路1段676巷1號

符合國家標準CNS14774, CNS14775
衛部醫器製壹字第009107號
桃市藥販字第623202P773號
桃市藥製字第6132041426號